



MOBI 90



Стіл для електроприладів, фізіотерапевтичних приборів та ін. З каналом для дротів та місцем зберігання блоків живлення, подовжувача.

Всі полиці, крім верхньої, можна переставляти (мінати) в будь-якому зручному для себе порядку. Стіл легко збирається. Покриття - порошкова емаль.

Розмір столу у зборі, мм.: Висота: **900** Ширина: **460** Глибина: **480** Вага (нетто): **13** кг.

Комплектація: 1 верхня полицка; 3 середні полицки зі змінною висотою; ящик (нижня частина) для блоків живлення та подовжувача; легкоз'ємний захисний кожух для дротів; "виламні отвори" для дротів та подовжувача; ролики: з фіксатором - 2 шт., без фіксатора - 2 шт.; інструкція; комплект кріплення.


	DIN934 Гайка M4 цб	24
	DIN967 Гвинт M4x8 бург цб PZ+PL	24
	Шайба плоска M4 цб	40
	80L Самонарізний гвинт 4,2 x 13 цб PH	16
	ключ для складання столу	1
	Ролик прозорий – КМА d 50 зі стопором (GTV)	2
	Ролик прозорий – КМА d 50 (GTV)	2

Виріб відвантажується: в розібраному вигляді, в упаковці.


Стіл збирає одна людина, згідно з наведених малюнків.

Увага! На початку збирання столика, кріплення не затягувати.


Щоб виламати отвір, необхідно обережно але різко вдарити в місці його з'єднання

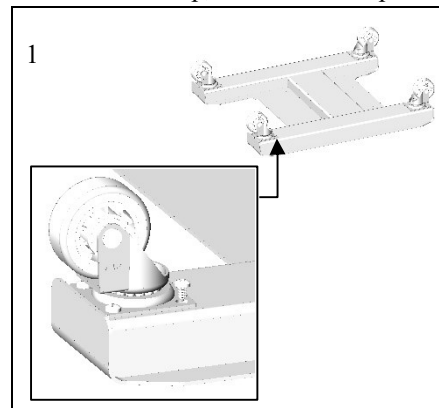


Ролики: самонаріз 80L, шайба M4

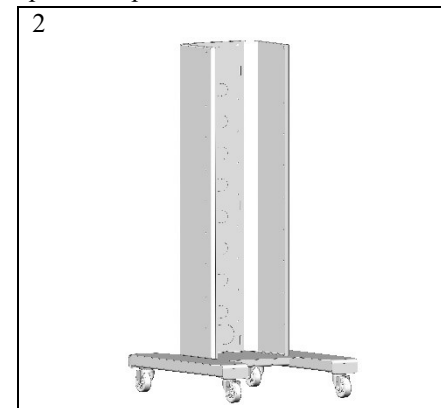


Стійки: гвинт M4, шайба M4, гайка M4.

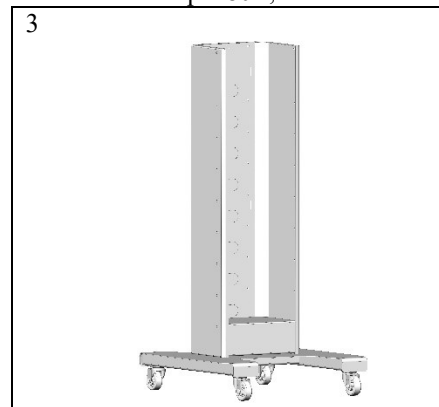


Для встановлення ящика знизу (за необхідністю), виламуємо нижній отвір

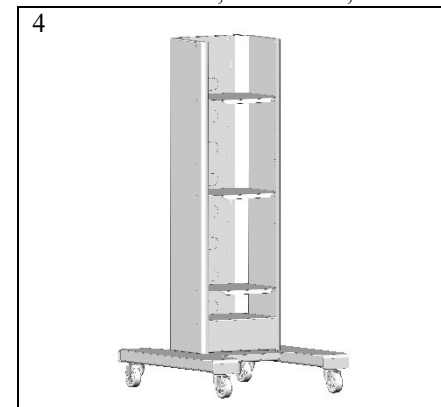

Полиці ставимо, починаючи з нижньої,

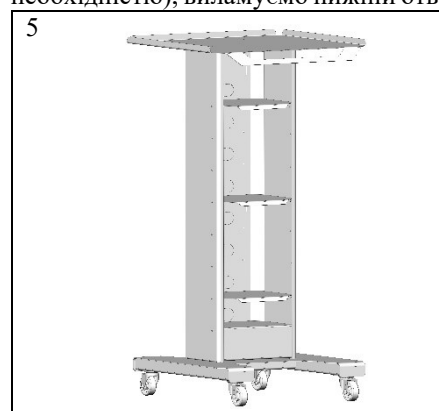

Кріпимо верхню полицку

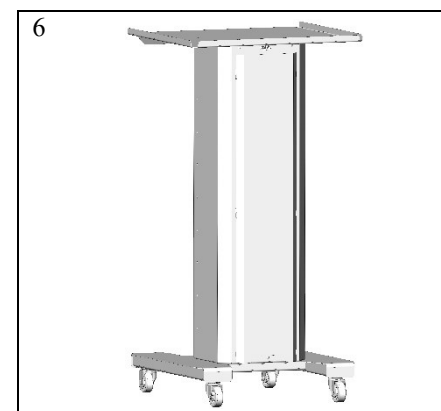

Стягуємо всі кріплення, встановлюємо легкоз'ємну панель (за необхідністю).

Ще більше інформації, на сайті: **kit.com.ua**